



Jetzt noch pflegeleichter und rutschsicherer

Sleeping Nurse Pro - Qualitätssturzmatte

Produkthinweise

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Die Sleeping Nurse ist eine Qualitätssturzmatte für sturzgefährdete Menschen. Der bewährte Fallschutz aus Naturkautschuk ist seit März 2022 schwarz (vorher gelb) und durch seine optimierte semipermeable Membran rutschsicherer und schmutzabweisender, auch gegen Ammoniak und Harn.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise, damit Sie lange Freude an der Matte haben.

Allgemeine Schutzhinweise und Lagerung

- Die rutschsichere Kautschukbeschichtung, schwarz, der 2-lagigen Sleeping Nurse Pro, immer nach unten legen.
- Sie schützen die Matte dauerhaft vor Schäden, wenn sie flach auf dem Boden liegt. Bitte nicht knicken. Wenn die Matte nicht im Einsatz ist, lagern Sie die Sleeping Nurse bitte aufgerollt im Originalkarton.
- Die identischen Oberflächen der schwarzen Einzelmatten können wahlweise oben oder unten liegen.

Schutz vor Verrutschen

Sie können die 2-lagige Matte bei Bedarf mit den Rädern des Pflegebettes fixieren.

Schutz vor Verschmutzung und Geruchsbelästigung mit Flüssigkeiten

Damit keine Flüssigkeiten unter die Matte gelangen, können Sie die Kanten rundum mit doppelseitigem Klebeband auf sauberem und glattem Untergrund zusätzlich fixieren. Das macht vor allem dann Sinn, wenn Harnsäure unter die Matte gelangen kann.

Ecken fixieren

Sie können auch nur die Ecken der Matte fixieren, zum Beispiel, wenn die Ecken versehentlich geknickt wurden. Lösen Sie hierfür die Schutzfolie auf der Unterseite der Matte und drücken Sie die Ecken mit leichtem Druck auf den Boden. Wenn Sie die Matte verrücken, können Sie ggf. Klebereste auf dem Boden mit Waschbenzin entfernen.

Reinigen der Matte

Die Sleeping Nurse Qualitätssturzmatte kann mit jedem Reinigungsmittel, das für Kautschukböden zugelassen ist, gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen des Oberbelags können Sie mit einer Bürste oder einem Schrubber entfernen.

Für Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren i-care Ansprechpartner oder rufen unseren Kundenservice unter 0241-51569125 an.